

CURA rápido plus+

Υγροποιημένη κόλλα επίδεσης για εφαρμογή στο δέρμα.
Διευκολύνει τη διαδικασία επούλωσης και προστατεύει από
εξωτερικούς παράγοντες γρήγορα, ανώδυνα χωρίς να ερεθίζει.

Περιέχει:

- N Butyl cyanoacrylate

Ενδείκνυται:

- Προστασία, σύγκλιση και επούλωση μικρών πληγών
- Οδοντιατρικές και χειρουργικές επεμβάσεις
- Αιμόσταση τραυμάτων

- Προσεγγίστε τα χείλη της τομής μεταξύ τους (αν χρειαστεί) και εφαρμόστε μια λεπτή στρώση του προϊόντος στην επιθυμητή περιοχή.
- Πιέστε τον περιέκτη για να διευκολύνετε τη ροή του προϊόντος και εφαρμόστε μια λεπτή στρώση τοπικά, δημιουργώντας μια λεπτή μεμβράνη.
- Όταν η στρώση που εφαρμόστηκε στεγνώσει, απελευθερώστε τα χείλη της τομής (ο χρόνος στερεοποίησης είναι από 30 δευτερόλεπτα έως 1 λεπτό ανάλογα με την ποσότητα κόλλας που εφαρμόσατε).

